

REPRODENT · MADE IN GÖTTINGEN

Pflegeanleitung für Schienen

Damit Ihre Schiene lange funktional, hygienisch und angenehm bleibt: Bitte beachten Sie diese Hinweise vor dem Einsetzen, bei der Reinigung und bei der Lagerung.

DREI SCHRITTE FÜR DIE RICHTIGE SCHIENENPFLEGE

01

Vor dem Einsetzen

Die Schiene vor dem Einsetzen für ca. eine Minute in warmes Wasser legen - bitte nur bis max. 50 °C. So wird sie elastischer und lässt sich spannungsfrei einsetzen.



02

Reinigung

Unter kaltem Wasser abspülen und mit einer weichen (Zahn-)Bürste reinigen. Geeignet sind Prothesenzahncreme oder mildes Spülmittel.



03

Lagerung

Nach der Reinigung vollständig trocknen lassen und in der mitgelieferten Box trocken und gut belüftet aufbewahren.



Bitte vermeiden

Keine normale Zahncreme oder Reiniger mit harten Putzkörpern verwenden. Sie können die Oberfläche aufrauen und die Materialqualität beeinträchtigen. Kein heißes Wasser über 50 °C verwenden.

